


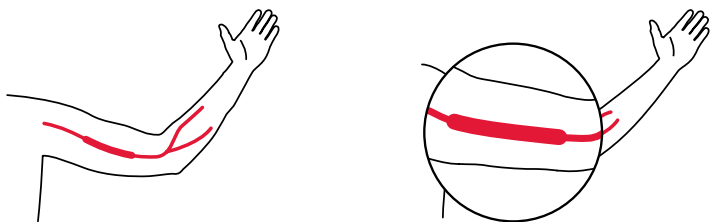


步骤 1

找到上臂的肱动脉位置（二头肌和三头肌之间）。




步骤 2

选择尺寸合适的袖带。袖带的内侧和外侧均有范围标记，帮助您确认其尺寸是否正确。

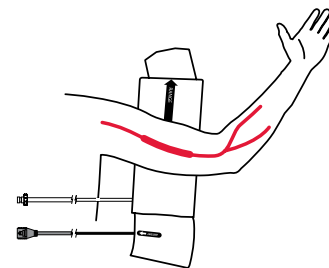


步骤 3

将袖带套在臂膀上。确保动脉标记朝向手臂，麦克风置于肱动脉上方，距肘 3-5 cm。

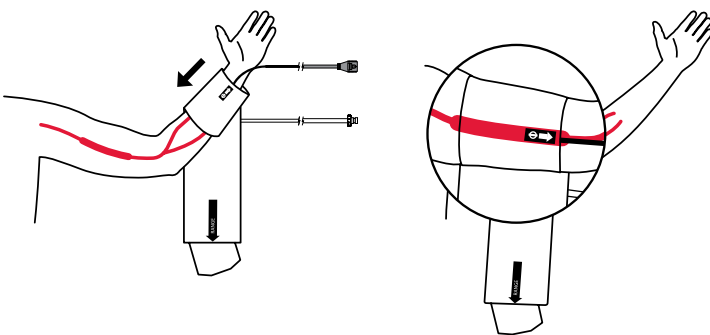

步骤 4


将袖带缠绕在臂上。使用随Tango M2系统提供的腕带，将病人电缆和麦克风电缆固定到病人手腕上，如下图所示。

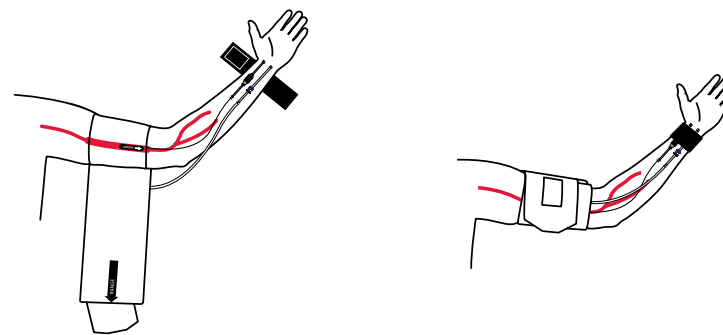




步骤 1

将麦克风放到麦克风垫上，如下所示。粘性面将帮助麦克风附着在麦克风垫上。

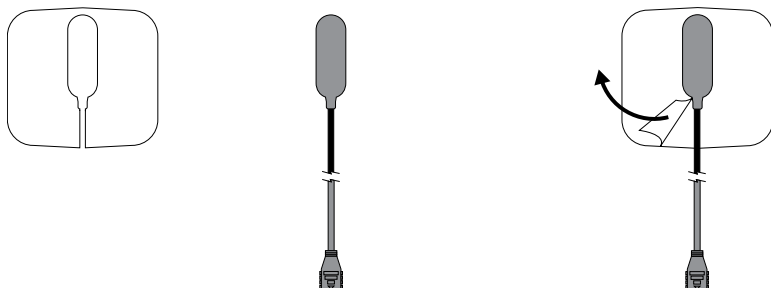


步骤 2

揭下麦克风垫上的保护膜，如下所示。

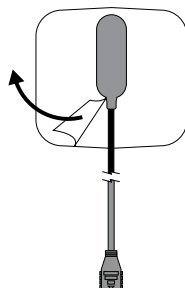


步骤 3

麦克风的放置对于保证Tango M2的测量性能十分重要。将麦克风放在肱动脉上方，介于二头肌和三头肌之间（肘褶上方，约两指宽）。

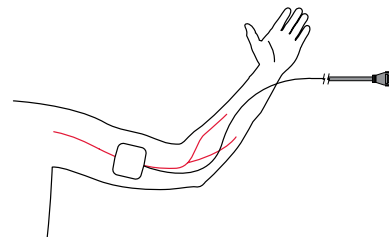


步骤 4

选择尺寸合格的SunTech一次性袖带。袖带的内侧和外侧均有范围标记，帮助您确认其尺寸是否正确。

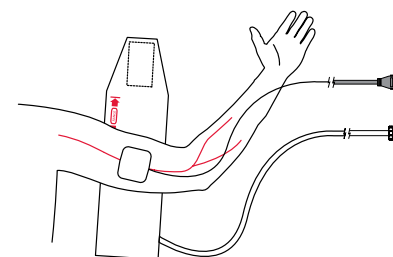


步骤 5

将袖带缠绕在臂上。动脉标记应在肱动脉上方，如下所示。

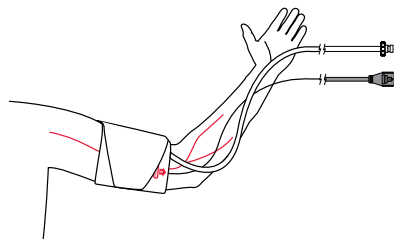


步骤 6

将麦克风电缆插入接口内，如下所示。接头可正反面插入。插接到位时，会听到一声卡嗒声。

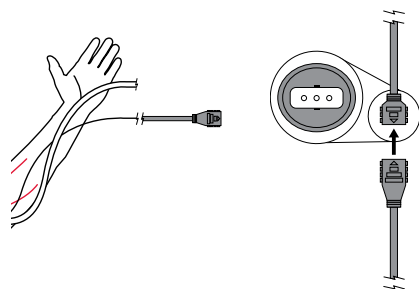

步骤 7

将袖带软管连接到Tango M2病人电缆的接头上，如下所示。

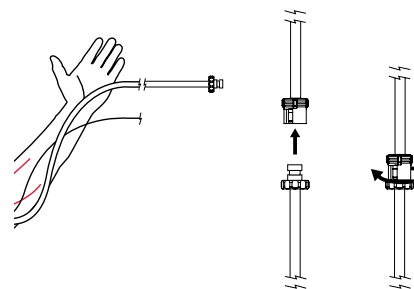

步骤 8

使用随Tango M2系统提供的腕带，将病人电缆和麦克风电缆固定到病人手腕上，如下图所示。

