
Tipps fur genaue Blutdruckmessungen




Vor der Blutdruckmessung sollte der Patient fünf Minuten ruhig und entspannt sitzen

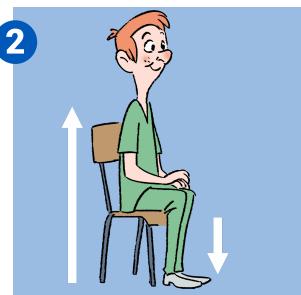

Der Patient sollte rückengestützt sitzen und die Füße flach auf den Boden stellen



Fragen sie den Patienten ob er kürzlich geraucht hat, Koffein getrunken oder die Harnblase entleert hat

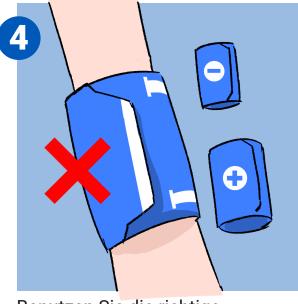

Benutzen Sie die richtige Manschettengröße, falls der Hinweispfeil außerhalb der gekennzeichneten Markierung ist, benutzen Sie eine nächst größere oder kleinere Manschette



Achten Sie darauf, dass die Arterienmarkierung an der Manschette mit der Oberarmarterie übereinstimmt




Achten Sie darauf, dass der Patientenarm auf Höhe des Herzens gelagert ist




Legen Sie die Manschetten niemals über dicke Kleidungsstücke an



Bitte während der Messung nicht sprechen

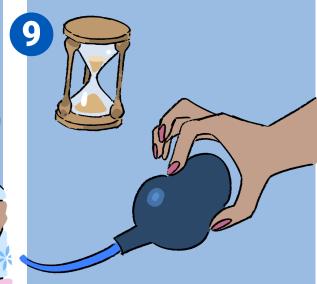

Achten Sie während des Messens darauf, den Luftdruck nur langsam abzulassen, 2-3 mmHg pro Sekunde

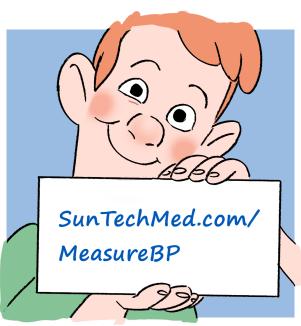

Weitere Informationen erhalten Sie durch unser Video

