



SunTech® *Tango* M2

STRESS BP


Vaihe 1

Etsi olkavarsivaltimo tunnustelemalla kolmpäisen olkalihaksen ja hauiksen välistä.




Vaihe 2

Valitse oikeankokoinen mansetti. Mansetissa on kokomerkinnyt sisä- ja ulkopuolella oikean koon valitsemiseksi.

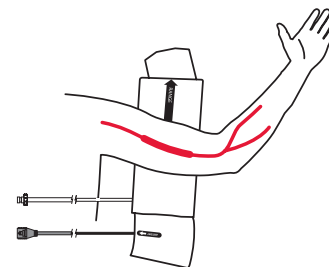


Vaihe 3

Aseta mansetti olkavarteen. Varmista, että valtimon merkkipiste osoittaa alaspäin olkavarren suunnassa ja että mikrofoni sijaitsee olkavarsivaltimon päällä, 3–5 cm päässä kyynärpästä.

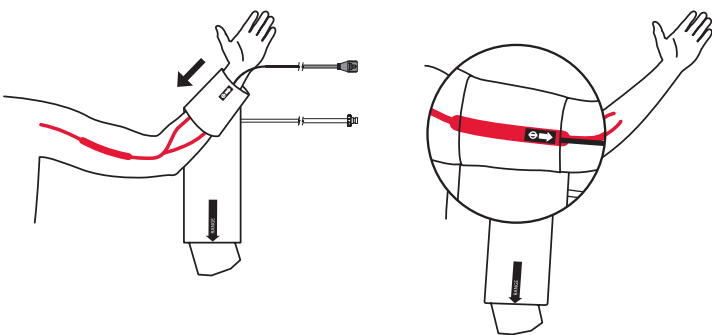

Vaihe 4


Kiinnitä mansetti tukevasti olkavarren ympärille. Käytä Tango M2 -järjestelmän mukana toimitettuja rannenuhoja sekä potilasjohdon että mikrofonin johdon kiinnittämiseksi tukevasti potilaan ranteeseen alla olevien kuvien mukaisesti.

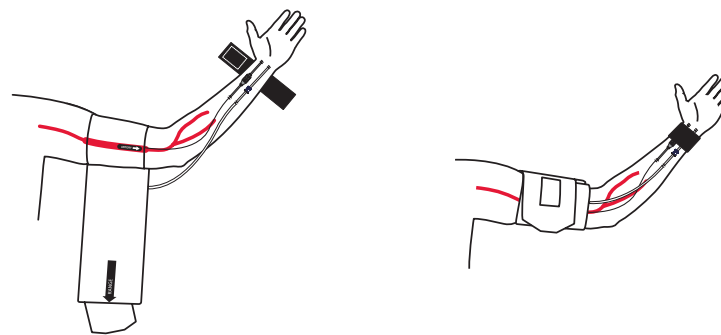



Vaihe 1

Aseta mikrofoni mikrofonilappuun kuvan osoittamalla tavalla. Liimapinta pitää mikrofonin paikallaan mikrofonilappun sisällä.

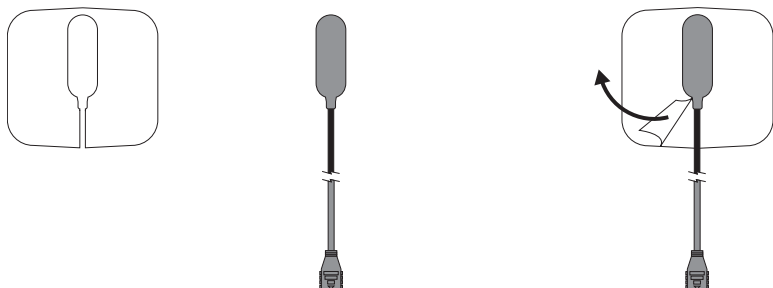


Vaihe 2

Irrota suojus mikrofonilapusta kuvan osoittamalla tavalla.


Vaihe 3

Mikrofonin sijoittaminen oikein on olennaisen tärkeää Tango M2:n toiminnan kannalta. Aseta mikrofoni olkavarsivaltimon päälle hauksen ja kolmipäisen olkalihakseen väliin (noin kahden sormenleveyden verran kynnärtaipeesta ylöspäin).

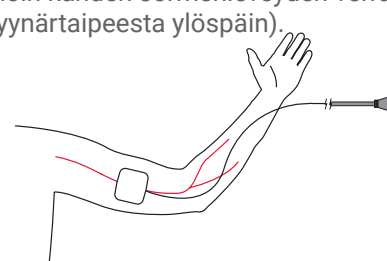


Vaihe 4

Valitse oikeankokoinen kertakäyttöinen Sun Tech -mansetti. Mansetissa on kokomerkinnyt sisä- ja ulkopuolella oikean koon valitsemiseksi.

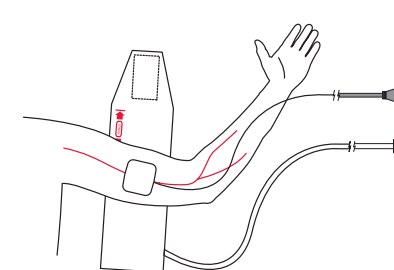


Vaihe 5

Kiinnitä mansetti tukevasti olkavarren ympärille. Valtimomerkin tulee olla olkavarsivaltimon päällä kuvan osoittamalla tavalla.

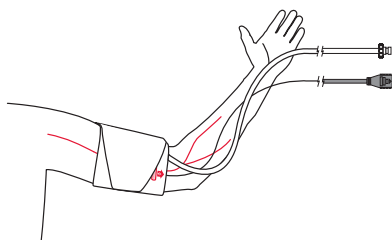


Vaihe 6

Aseta mikrofonin johto liittimeen kuvan osoittamalla tavalla. Liitin voidaan kytkeä missä tahansa asennossa. Kun liitin istuu oikein paikoilleen, kuuluu selkeä naksahdus.

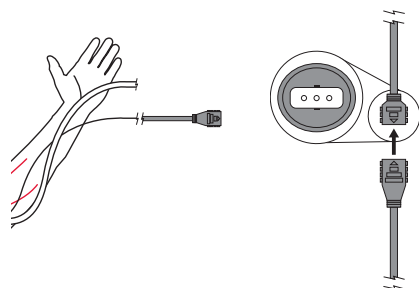

Vaihe 7

Liitä mansetin letku Tango M2:n potilasjohdon liittimeen kuvan osoittamalla tavalla.

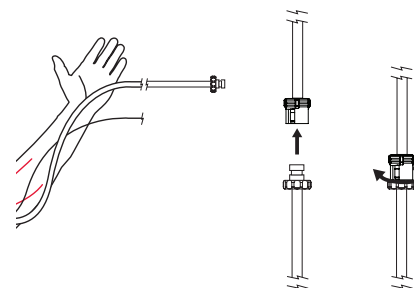

Vaihe 8

Käytä Tango M2 -järjestelmän mukana toimitettuja rannenuhoja sekä potilasjohdon että mikrofonin johdon kiinnittämiseksi tukevasti potilaan ranteeseen alla olevien kuvien mukaisesti.

