




SunTech® *Tango* M2 STRESS BP


Trinn 1

Palper brakialarterien mellom triceps og biceps.

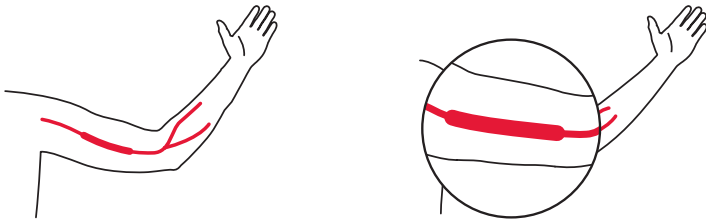


Trinn 2

Velg mansjett med riktig størrelse. Mansjetten har skalamarkeringer både på innsiden og utsiden for å sikre bruk av riktig størrelse.

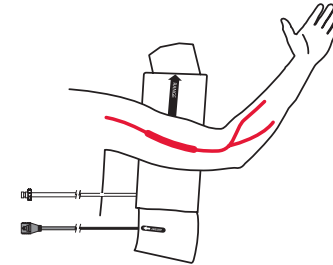


Trinn 3

Plasser mansjetten på armen. Pass på at arteriemerket peker nedover armen og at mikrofonen er plassert over brakialarterien, 3–5 cm fra albuen.

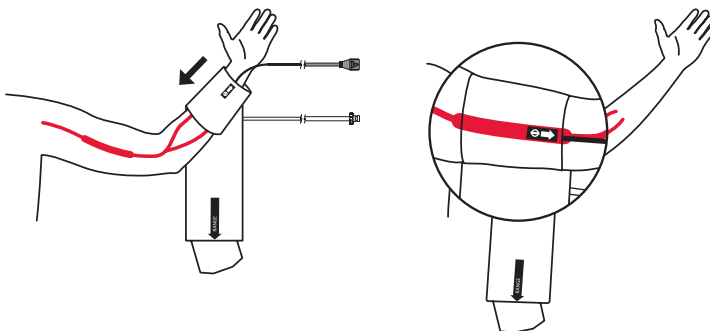


Trinn 4

Pakk mansjetten fast rundt armen. Bruk håndleddstroppene som følger med Tango M2-systemet, til å feste både pasientkabelen og mikrofonkabelen godt til pasientens håndledd som vist nedenfor.

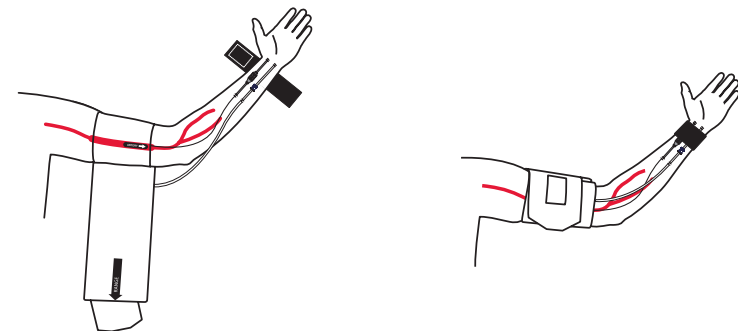


Trinn 1

Plasser mikrofonen i mikrofonputen som vist. Den heftende overflaten vil holde mikrofonen inne i mikrofonputen.

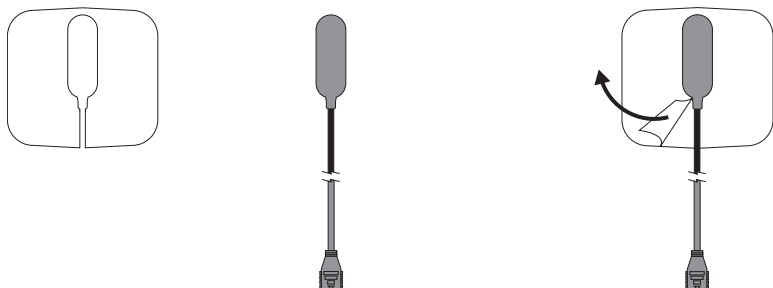


Trinn 5

Pakk mansjetteen fast rundt armen. Arteriemarkene skal være over brakialarterien som vist nedenfor.

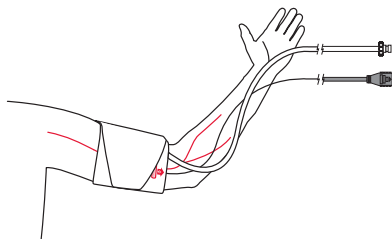


Trinn 2

Riv av den beskyttende filmen på mikrofonputen som vist nedenfor.

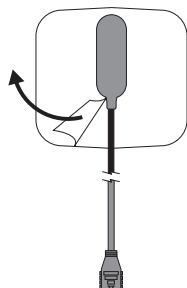


Trinn 6

Sett mikrofonkabelen inn i kontakten som vist nedenfor. Kontaktene kan settes inn begge veier. Du vil høre et klikk når du har fått sikker tilkobling.

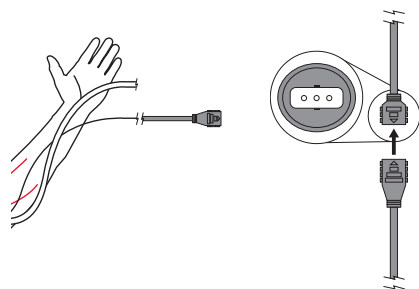


Trinn 3

Mikrofonplasseringen er avgjørende for ytelsen til Tango M2. Plasser mikrofonen over brakialarterien, mellom biceps- og tricepsmusklene (omtrent 2 fingerbredder over albuegropen).

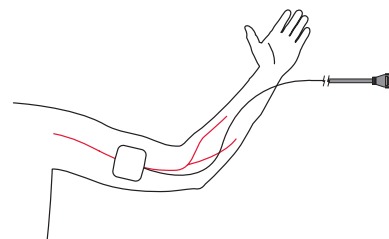


Trinn 7

Koble mansjettslangen til pasientkabelkontakten på Tango M2s pasientkabel som vist nedenfor.

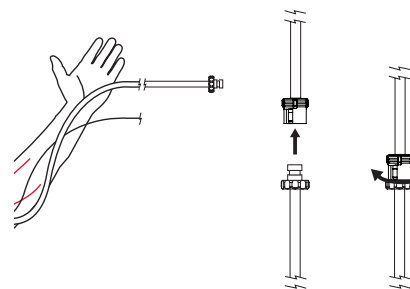

Trinn 4

Vel engangsmansjetteen fra SunTech som har omtrent riktig størrelse. Mansjetteen har skalamarkeringer både på innsiden og utsiden for å sikre bruk av riktig størrelse.

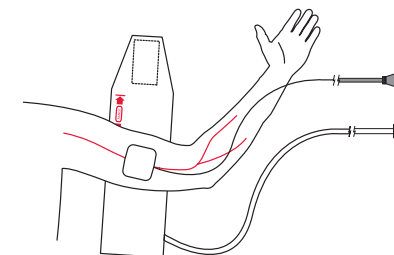

Trinn 8

Bruk håndleddstroppene som følger med Tango M2-systemet, til å feste både pasientkabelen og mikrofonkabelen godt til pasientens håndledd som vist nedenfor.

