


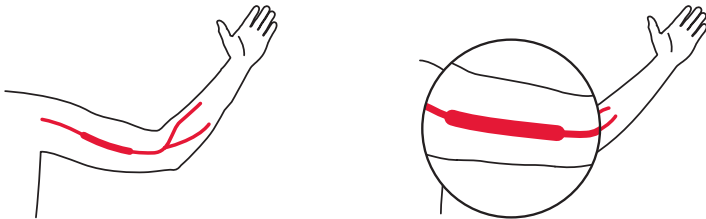


Steg 1

Palpera arteria brachialis mellan triceps och biceps.




Steg 2

Välj en manschett med rätt storlek. Manschetten har omfångsmarkeringar på både in- och utsidan för att säkerställa att rätt storlek väljs.

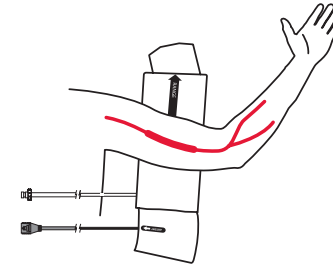


Steg 3

Placera manschetten på armen. Kontrollera att artärmarkören pekar ned mot handen och att mikrofonen placeras över arteria brachialis, 3–5 cm från armbågen.

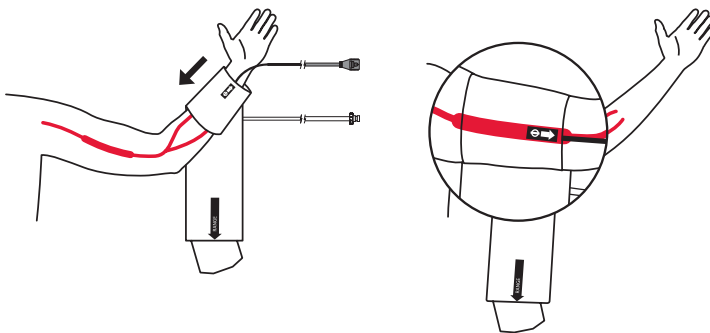

Steg 4


Linda manschetten runt armen. Använd handledsbanden som följer med Tango M2-systemet för att fästa både patientkabeln och mikrofonkabeln på patientens handled enligt nedan.

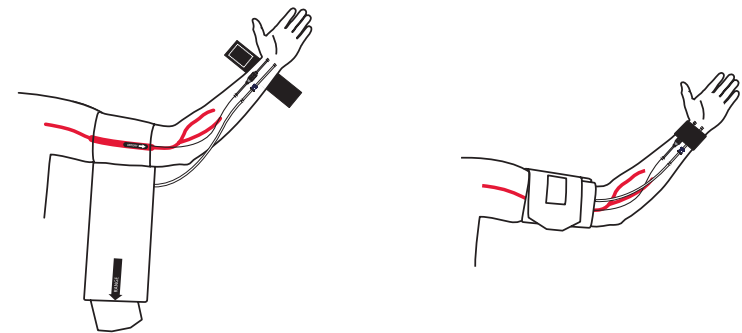




Steg 1

Placera mikrofonen i mikrofonkudden enligt anvisningarna. Den självhäftande ytan kommer att hålla fast mikrofonen inuti mikrofonkudden.

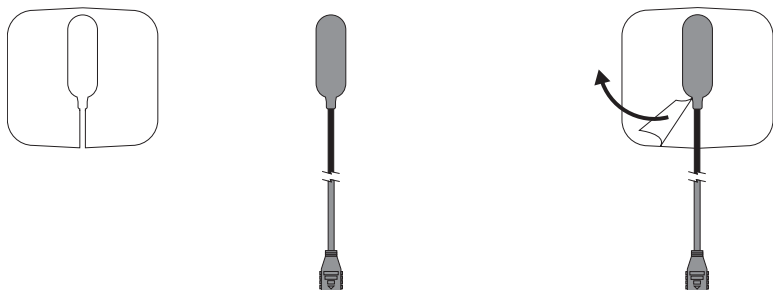


Steg 2

Dra bort skyddsfilm på mikrofonkudden enligt nedan.

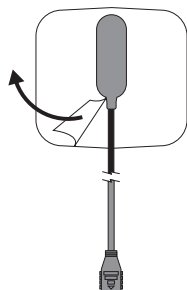


Steg 3

Mikrofonens placering är viktig för att Tango M2 ska fungera korrekt. Placera mikrofonen över arteria brachialis, mellan biceps och triceps (ca två fingerbredder ovanför armvecket).

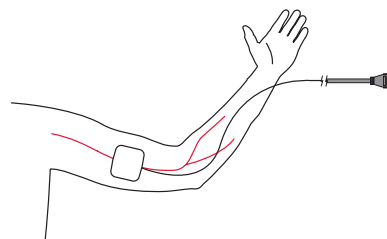


Steg 4

Välj en SunTech-engångsmanschett i rätt storlek. Manschetten har omfångsmarkeringar på både in- och utsidan för att säkerställa att rätt storlek väljs.

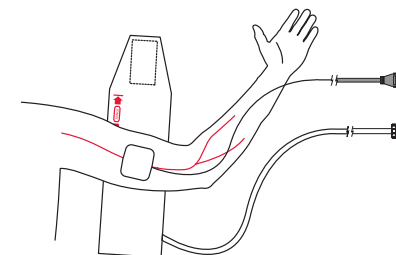


Steg 5

Linda manschetten runt armen. Artärmarkören ska ligga över arteria brachialis enligt nedan.

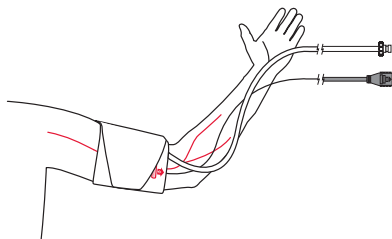


Steg 6

För in mikrofonkabeln i kontakten enligt nedan. Kontakten kan föras in i valfri riktning. Ett klick hörs när den sitter korrekt.

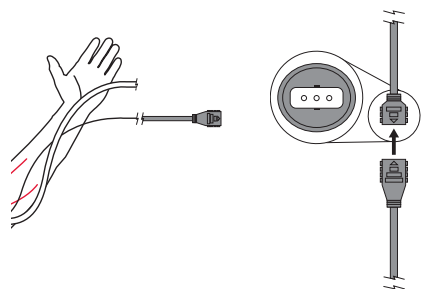

Steg 7

Anslut manschettsslagen till patientkabeluttaget på Tango M2:s patientkabel enligt nedan.

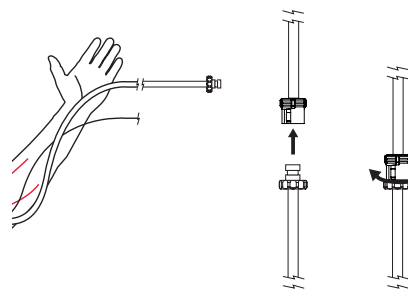

Steg 8

Använd handledsbanden som följer med Tango M2-systemet för att fästa både patientkabeln och mikrofonkabeln på patientens handled enligt nedan.

