


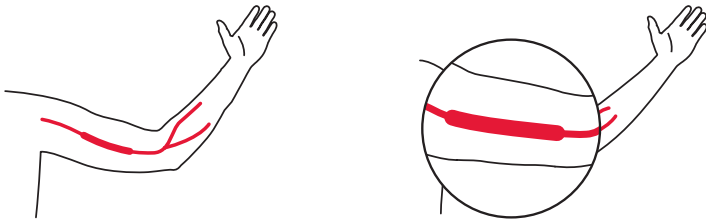


Langkah 1

Lakukan palpasi pada arteri brakialis di antara trisep dan bisep.




Langkah 2

Pilih manset berukuran sesuai. Manset mempunyai penanda rentang di sisi dalam dan sisi luar untuk memastikan ukuran yang sesuai.

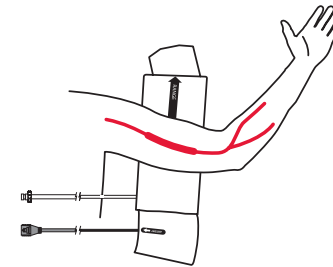


Langkah 3

Tempatkan manset di lengan. Pastikan bahwa titik penanda arteri menunjuk ke bawah lengan dan mikrofon ditempatkan di atas arteri brakialis, 3–5 cm dari siku.

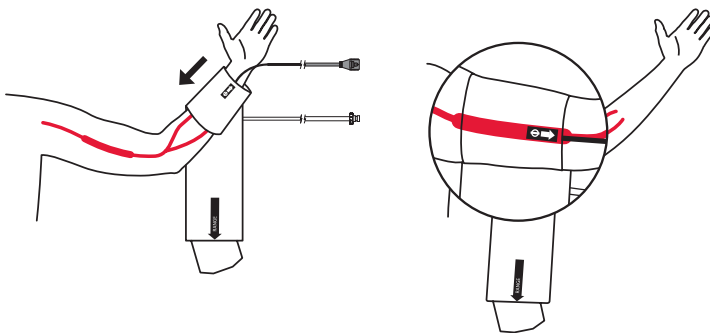

Langkah 4


Lilitkan manset dengan erat di sekeliling lengan. Gunakan tali pergelangan yang disediakan dengan sistem Tango M2 untuk menahan kabel pasien dan kabel mikrofon ke pergelangan pasien seperti ditunjukkan di bawah.

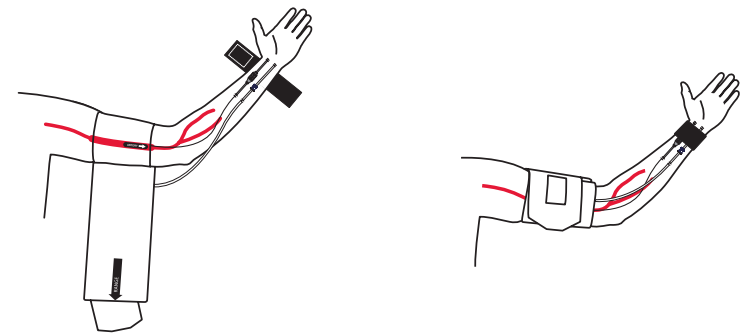



Langkah 1

Masukkan mikrofon ke dalam bantalan mikrofon seperti yang ditunjukkan. Permukaan perekat akan menahan mikrofon di dalam bantalan mikrofon.

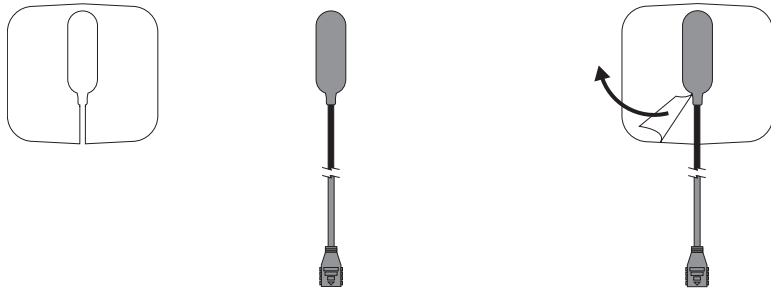

Langkah 2


Kupas lapisan pelindung pada bantalan mikrofon seperti ditunjukkan di bawah.

Langkah 3

Penempatan mikrofon sangat penting untuk kinerja Tango M2. Tempatkan mikrofon di atas arteri brakialis, di antara otot bisep dan trisep (sekitar 2 lebar jari di atas tekukan siku).

Langkah 4

Pilih manset sekali pakai SunTech berukuran sesuai. Manset mempunyai penanda rentang di sisi dalam dan sisi luar untuk memastikan ukuran yang sesuai.

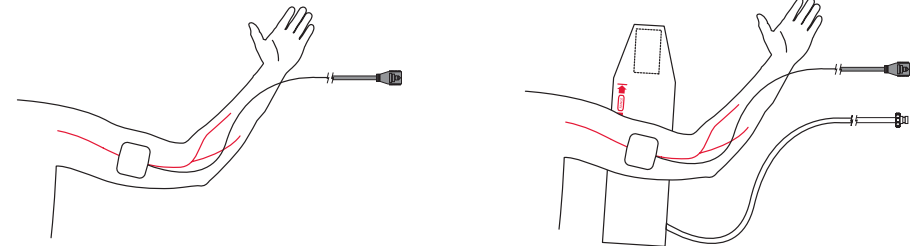

Langkah 5

Lilitkan manset dengan erat di sekeliling lengan. Penanda arteri harus berada di atas arteri brakialis seperti ditunjukkan di bawah.

Langkah 6

Sisipkan kabel mikrofon ke dalam konektor seperti ditunjukkan di bawah. Konektor dapat dimasukkan dalam arah mana pun. Suara klik akan terdengar saat terjadi koneksi yang benar.

Langkah 7

Hubungkan slang manset ke konektor kabel pasien dari kabel pasien Tango M2 seperti ditunjukkan di bawah.

Langkah 8

Gunakan tali pergelangan yang disediakan dengan sistem Tango M2 untuk menahan kabel pasien dan kabel mikrofon ke pergelangan pasien seperti ditunjukkan di bawah.

