




SunTech® *Tango* M2 STRESS BP


Adım 1

Triseps ile biceps arasında brakiyal arteri palpasyonla bulun.

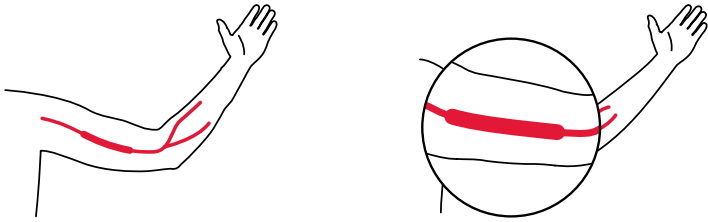


Adım 2

Uygun büyüklükte manşon seçin. Manşonun uygun büyüklük belirlemeyi sağlamak üzere hem içinde hem dışında aralık işaretleri vardır.

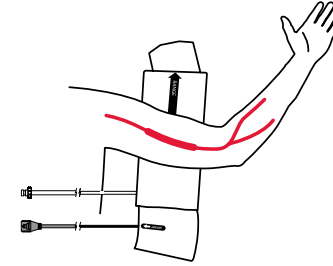


Adım 3

Manşonu kola yerleştirin. Arter işaretinin kolda aşağıya doğru baktığından ve mikrofonun dirsekten 3-5 cm uzakta, brakiyal arter üzerine yerleştirildiğinden emin olun.

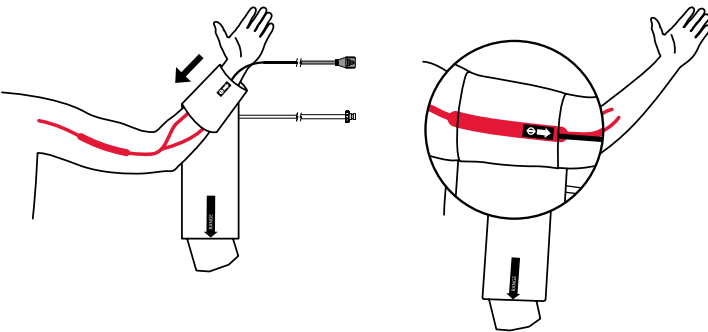

Adım 4


Manşonu kol etrafına sıkıca sarın. Hem hasta kablosu hem mikrofon kablosunu aşağıda gösterildiği gibi hastanın bileğine sabitlemek için Tango M2 sistemiyle sağlanan bilek şeritlerini kullanın.

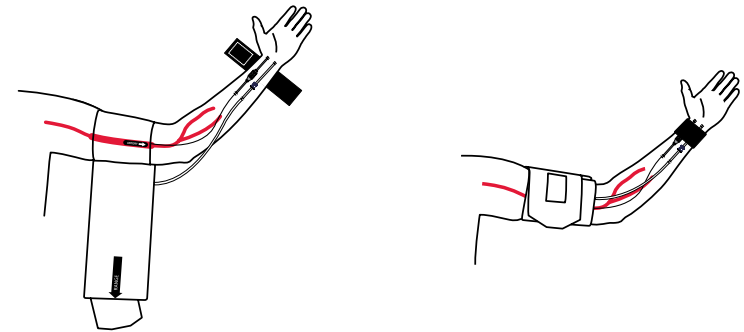




Adım 1

Mikrofonu gösterildiği gibi mikrofon pedi içine yerleştirin. Yapışkan yüzey mikrofonu mikrofon pedi içinde tutar.

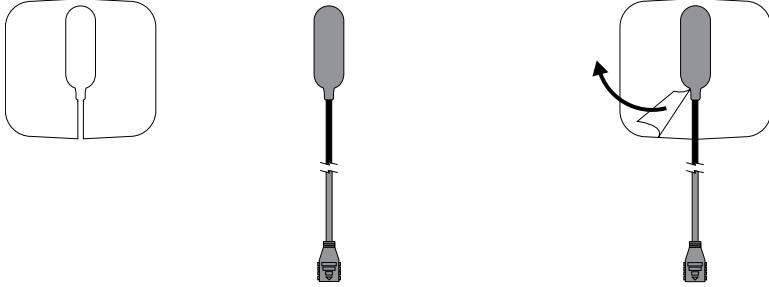


Adım 5

Manşonu sıkıca kol etrafına sarın. Arteriyel işaret aşağıda gösterildiği gibi brakial arter üzerinde olmalıdır.

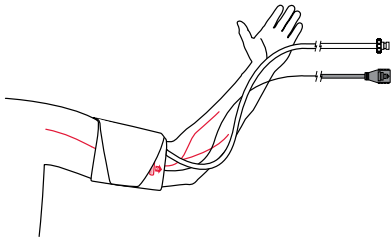


Adım 2

Mikrofon pedi üzerindeki koruyucu kaplamayı aşağıda gösterildiği gibi soyun.

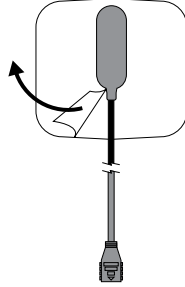


Adım 6

Mikrofon kablosunu konektör içine aşağıda gösterildiği gibi yerleştirin. Konektörler herhangi bir yönelimle yerleştirilebilir. Sağlam bir bağlantı yapıldığında duyulabilir bir tıklama olacaktır.

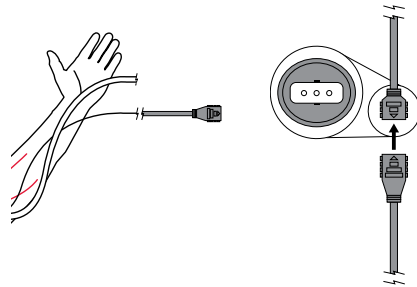


Adım 3

Mikrofon yerleştirme Tango M2 performansı için çok önemlidir. Mikrofonu biceps ile triseps kasları arasına, brakial arter üzerine yerleştirin (yaklaşık olarak dirsek katlantısının 2 parmak üstüne).

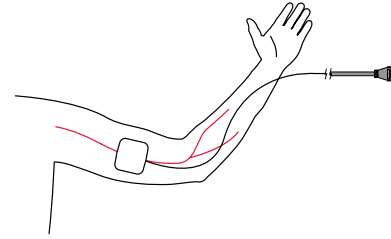


Adım 7

Manşon hortumunu aşağıda gösterildiği gibi Tango M2 hasta kablosunun kablo konektörüne takın.

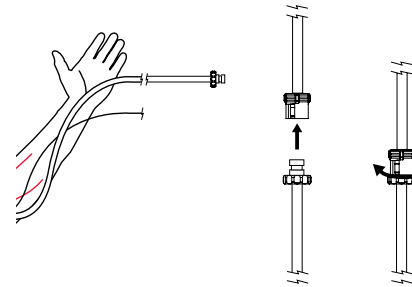

Adım 4

Uygun büyüklükte SunTech tek kullanımlık manşonu seçin. Manşonun uygun büyüklük belirlemeyi sağlamak üzere hem içinde hem dışında aralık işaretleri vardır.

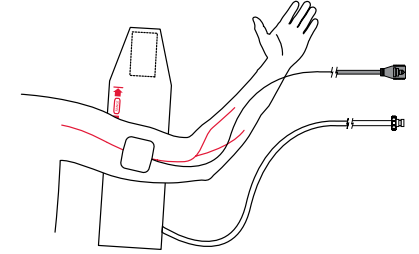

Adım 8

Hem hasta kablosu hem mikrofon kablosunu aşağıda gösterildiği gibi hastanın bileğine sabitlemek için Tango M2 sistemiyle sağlanan bilek şeritlerini kullanın.

