




SunTech® *Tango* M2 STRESS BP


Trin 1

Palper brachialis-arterien mellem biceps og triceps.

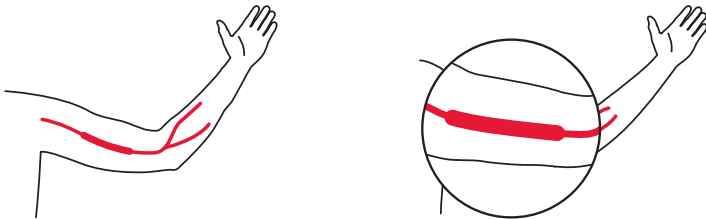


Trin 2

Vælg passende manchettestørrelse. Manchetten har områdemarkeringer på både inderside og yderside for at sikre korrekt størrelse.

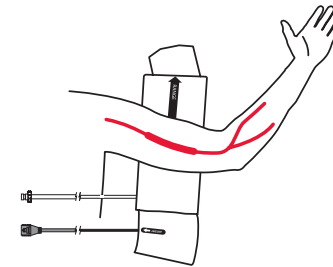


Trin 3

Sæt manchetten på armen. Kontroller, at arteriemarkeringen peger ned ad armen, og at mikrofonen er placeret over brachialis-arterien, 3 til 5 cm fra albuen.

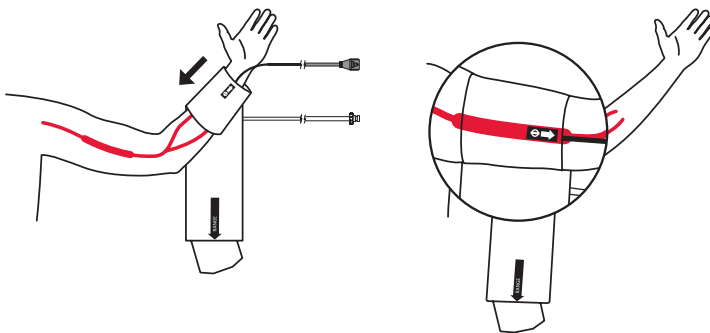

Trin 4


Fastgør manchetten omkring armen. Brug håndledsremmene, der følger med Tango M2-systemet, til at fastgøre både patientkablet og mikrofonkablet til patientens håndled som vist nedenfor.

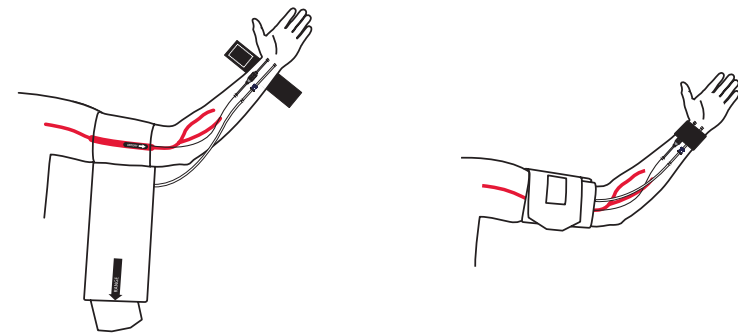




Trin 1

Placer mikrofonen i mikrofonpuden som vist. Den klæbende overflade holder mikrofonen inde i mikrofonpuden.

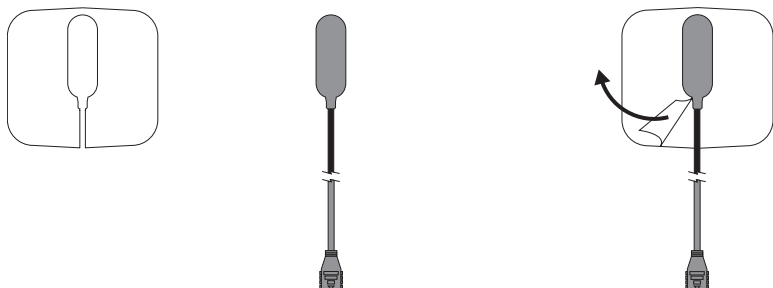


Trin 2

Træk beskyttelsesafdækningen af mikrofonpuden som vist nedenfor.

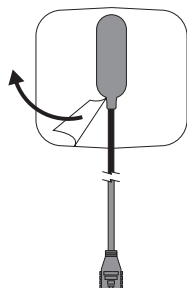


Trin 3

Mikrofonens placering er essentiel for Tango M2's ydeevne. Placer mikrofonen over brachialis-arterien mellem biceps- og tricepsmuskler (ca. bredden af to fingre over albuebøjningen).

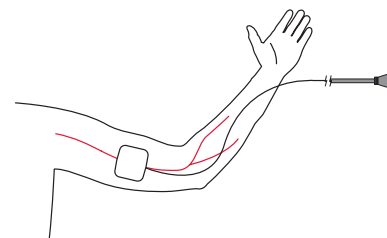


Trin 4

Vælg SunTech-manchetten til engangsbrug i den relevante størrelse. Manchetten har områdemarkeringer på både inderside og yderside for at sikre korrekt størrelse.

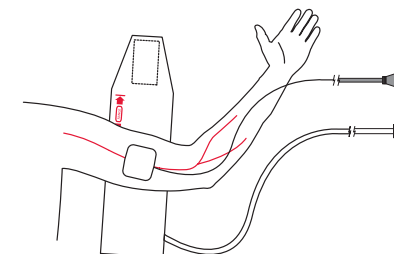


Trin 5

Fastgør manchetten omkring armen. Arteriemarkeringen skal være over brachialis-arterien som vist nedenfor.

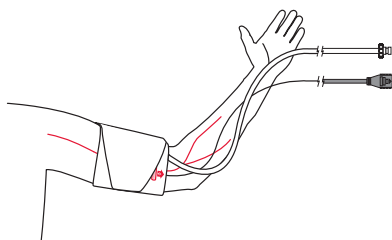


Trin 6

Sæt mikrofonkablet i stikket som vist nedenfor. Stikkene kan indsættes i enhver retning. Der høres et klik, når de er sikkert forbundet.

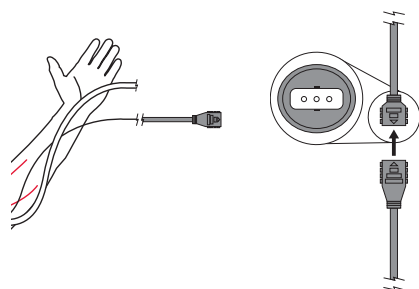

Trin 7

Slut manchetslangen til patientkabelstikket på Tango M2-patientkablet som vist nedenfor.

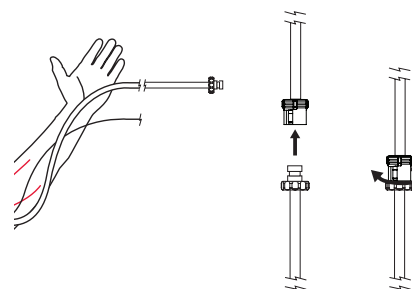

Trin 8

Brug håndledsremmene, der følger med Tango M2-systemet, til at fastgøre både patientkablet og mikrofonkablet til patientens håndled som vist nedenfor.

