


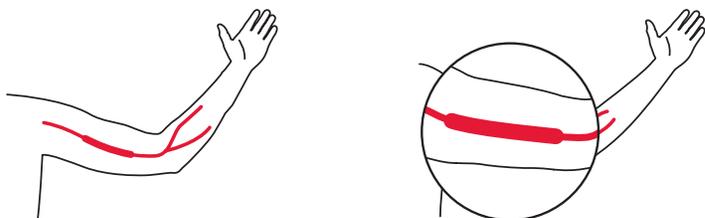


Этап 1

Нащупайте плечевую артерию между бицепсом и трицепсом.




Этап 2

Выберите манжету соответствующего размера. Для выбора размера используйте маркеры диапазонов на внешней и внутренней стороне манжеты.

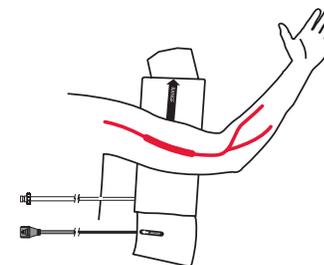


Этап 3

Наложите манжету на плечо. При этом маркер артерии должен быть обращен в сторону ладони, а микрофон должен располагаться поверх плечевой артерии на расстоянии от 3 до 5 см от локтевого сгиба.

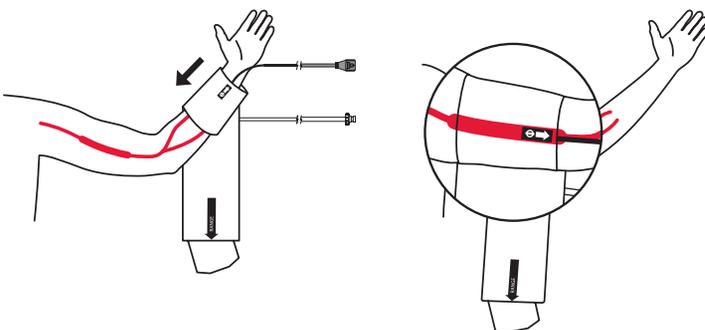

Этап 4


Оберните манжету вокруг плеча и закрепите ее. Используйте кистевые ремешки, входящие в комплект поставки Tango M2, для закрепления кабеля пациента и кабеля микрофона на руке, как показано ниже.

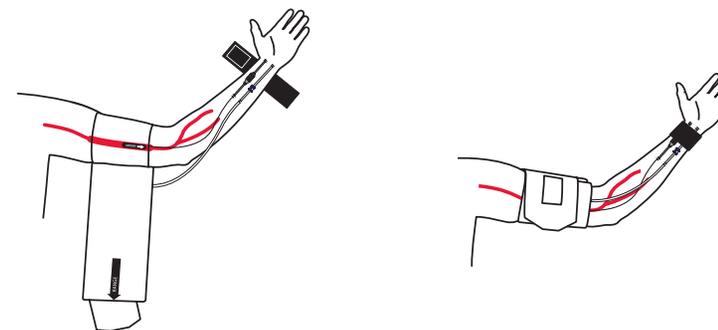




Этап 1

Установите микрофон на накладку для микрофона, как показано на рисунке. Микрофон удерживается на внутренней стороне наклейки благодаря клейкой поверхности.

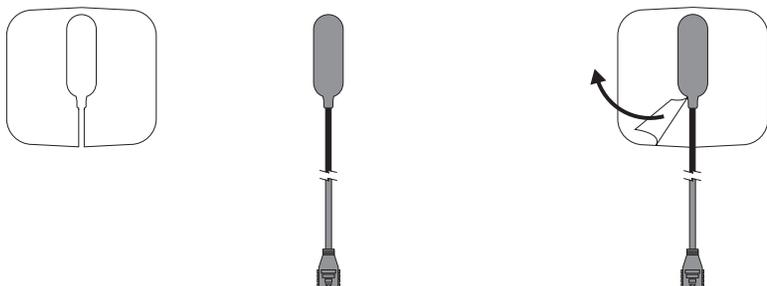


Этап 2

Снимите защитную пленку с наклейки для микрофона (см. рис. ниже).

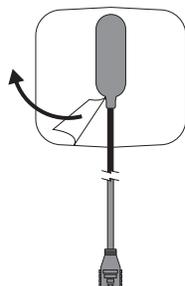


Этап 3

Правильность расположения микрофона крайне важна для работы Tango M2. Разместите микрофон над плечевой артерией между бицепсом и трицепсом (приблизительно на 2 пальца выше локтевого сгиба).

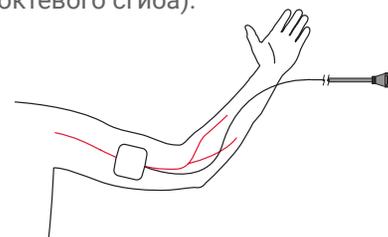


Этап 4

Выберите одноразовую манжету SunTech нужного размера. Для выбора размера используйте маркеры диапазонов на внешней и внутренней стороне манжеты.

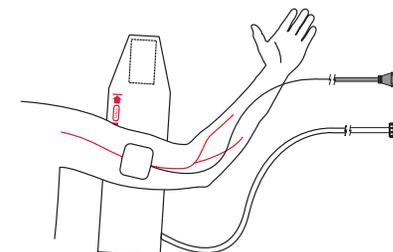


Этап 5

Оберните манжету вокруг плеча и закрепите ее. Маркер артерии должен располагаться поверх артерии, как показано ниже.

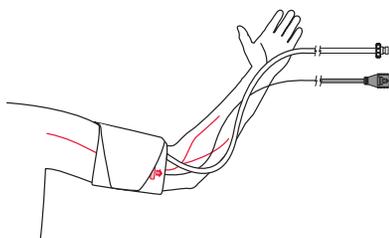


Этап 6

Вставьте кабель микрофона в разъем, как показано ниже. Разъемы можно вставлять в любой ориентации. Для надежного подсоединения разъем следует вставлять до щелчка.

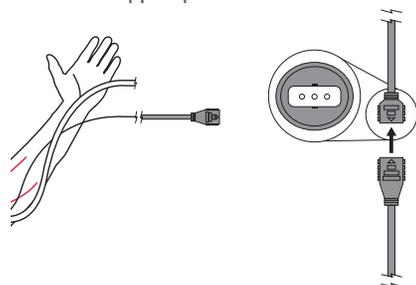

Этап 7

Подсоедините шланг манжеты к разъему на кабеле пациента монитора Tango M2, как показано ниже.

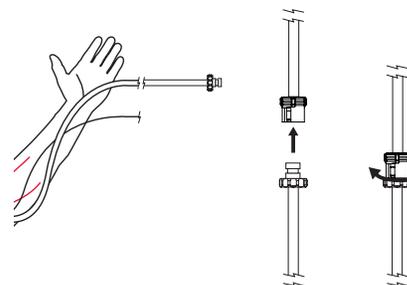

Этап 8

Используйте кистевые ремешки, входящие в комплект поставки Tango M2, для закрепления кабеля пациента и кабеля микрофона на руке, как показано ниже.

