





## Passo 1

Individuare tramite palpazione l'arteria brachiale fra il tricipite e il bicipite.

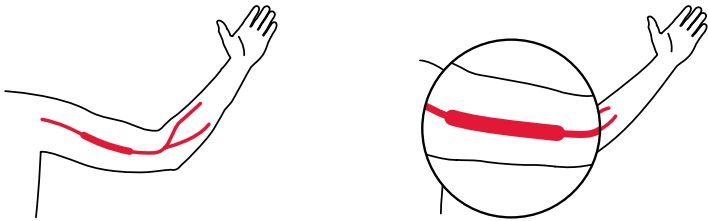


## Passo 2

Scegliere la misura appropriata di bracciale. Per assicurare che la misura sia corretta, il bracciale presenta dei marcatori sia all'interno che all'esterno.

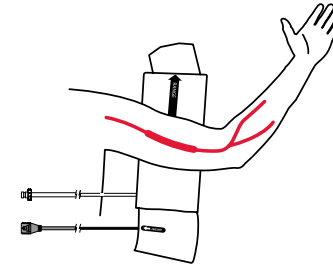


## Passo 3

Applicare il bracciale al braccio. Verificare che l'indicatore ARTERY sia rivolto verso il basso rispetto al braccio e che il microfono si trovi sull'arteria brachiale, a 3-5 cm dal gomito.

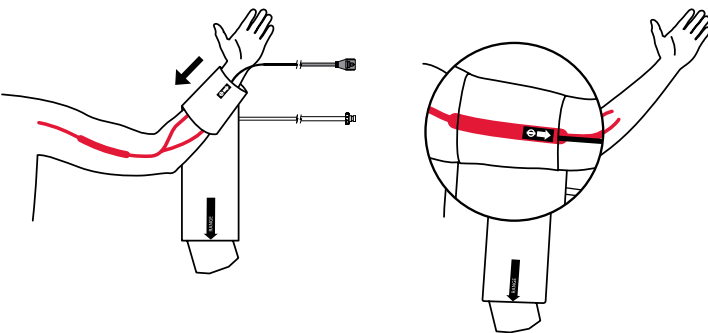


## Passo 4

Avvolgere bene il bracciale intorno al braccio. Utilizzare i cinturini forniti in dotazione con il sistema Tango M2 per fissare sia il cavo paziente che il cavo del microfono al polso del paziente, come illustrato di seguito.

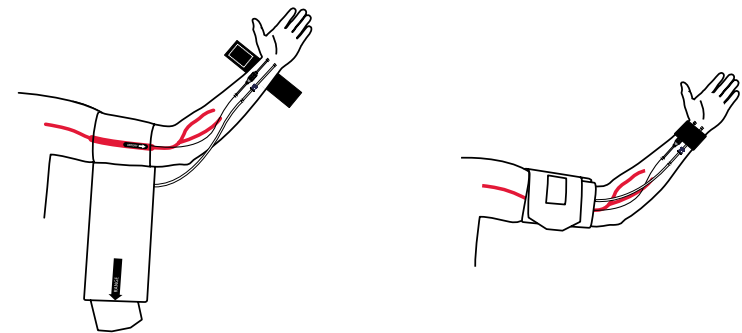


## Passo 1

Inserire il microfono nell'apposito cuscinetto, come illustrato di seguito. La superficie adesiva terrà il microfono all'interno del cuscinetto.

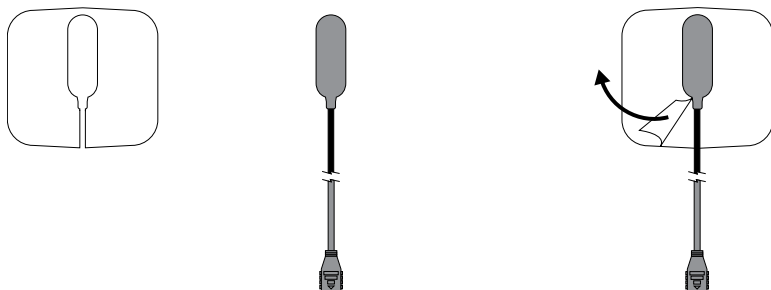


## Passo 2

Staccare la pellicola protettiva dal cuscinetto, come illustrato di seguito.

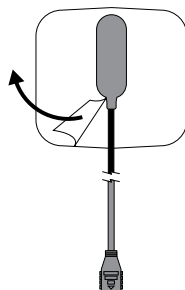


## Passo 3

Un corretto posizionamento del microfono è essenziale ai fini delle prestazioni del Tango M2. Posizionare il microfono sopra l'arteria brachiale, fra i muscoli del bicipite e del tricipite (a una larghezza di circa 2 dita sopra la piega del gomito).

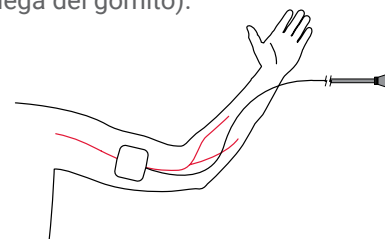


## Passo 4

Scegliere un bracciale monouso SunTech della misura adatta. Per assicurare che la misura sia corretta, il bracciale presenta dei marcatori sia all'interno che all'esterno.

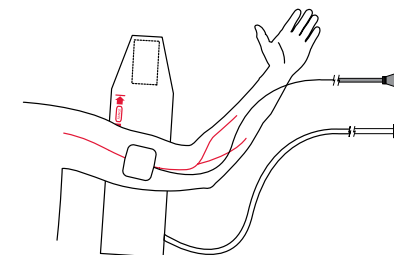


## Passo 5

Avvolgere bene il bracciale intorno al braccio. Il marcatore dell'arteria deve trovarsi sopra l'arteria brachiale, come illustrato di seguito.

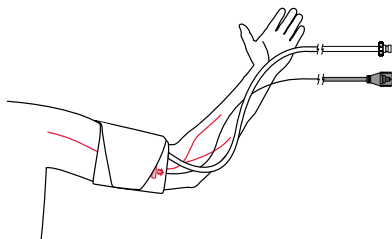


## Passo 6

Inserire il cavo del microfono nell'apposito connettore, come illustrato in figura. I connettori possono essere inseriti con qualunque orientamento. Quando viene effettuata una connessione sicura, si percepisce uno scatto.

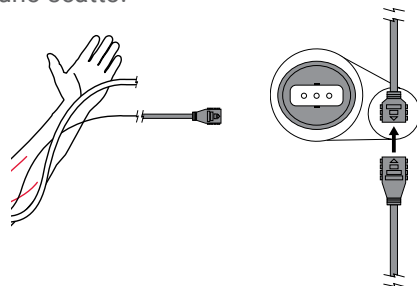

## Passo 7

Collegare il tubicino flessibile del bracciale all'apposito connettore del cavo paziente del Tango M2, come illustrato di seguito.

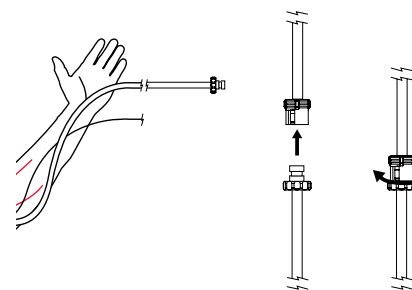

## Passo 8

Utilizzare i cinturini forniti in dotazione con il sistema Tango M2 per fissare sia il cavo paziente che il cavo del microfono al polso del paziente, come illustrato di seguito.

