


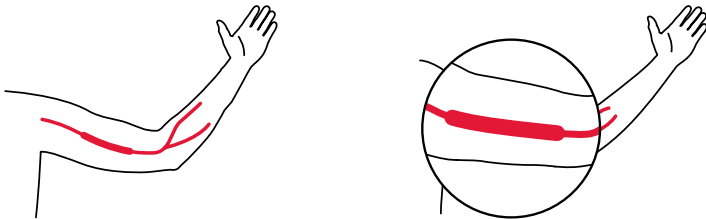


Paso 1

Palpe la arteria braquial, entre el bíceps y el tríceps.




Paso 2

Elija el tamaño de manguito apropiado. El manguito tiene unas marcas de colocación tanto en la parte interna como en la externa, para elegir un tamaño adecuado.

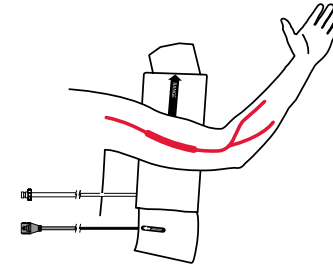


Paso 3

Coloque el manguito en el brazo. Asegúrese de que la parte que representa la arteria queda mirando hacia abajo y que el micrófono se coloca sobre la arteria braquial, a una distancia de 3 a 5 cm del codo.

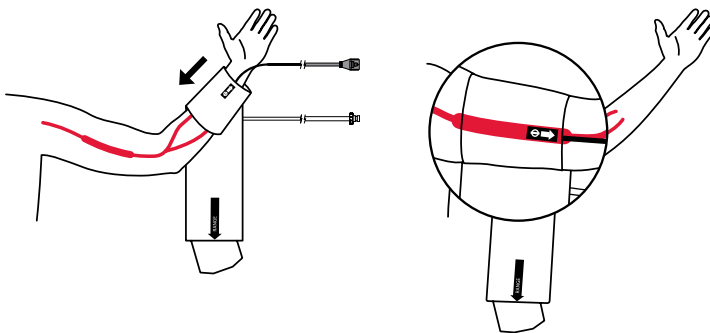


Paso 4

Coloque el manguito alrededor del brazo y ajústelo. Utilice las muñequeras suministradas con el monitor Tango M2 para fijar tanto el cable del paciente como el cable del micrófono a la muñeca del paciente, tal y como se muestra a continuación.

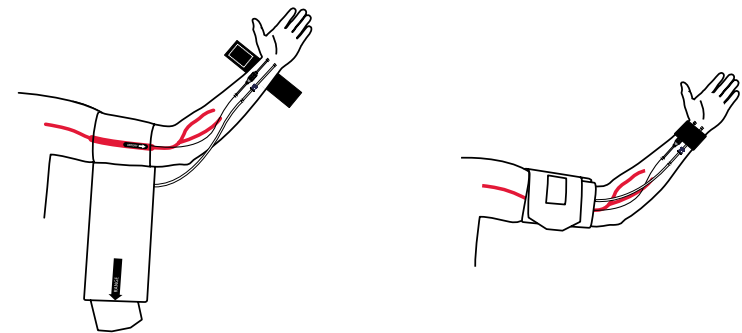


Paso 1

Coloque el micrófono sobre el fijador del micrófono como se indica. La superficie adhesiva del fijador mantendrá el micrófono en el interior.

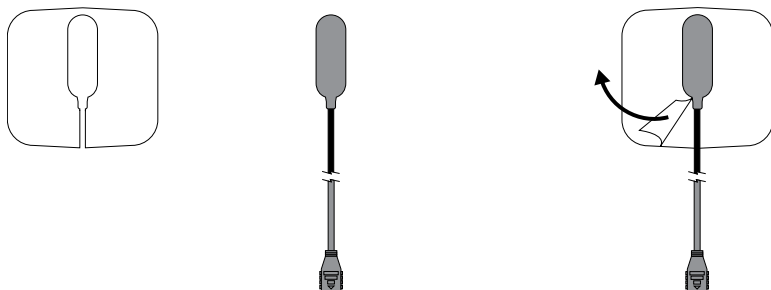


Paso 2

Despegue la cubierta protectora del fijador del micrófono tal y como se indica debajo.

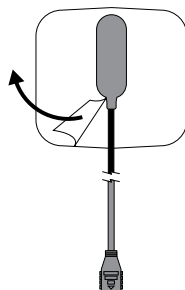


Paso 3

La colocación del micrófono es crucial para el buen funcionamiento del Tango M2. Coloque el micrófono sobre la arteria braquial, entre los músculos bíceps y tríceps (a unos dos dedos de la flexura del codo).

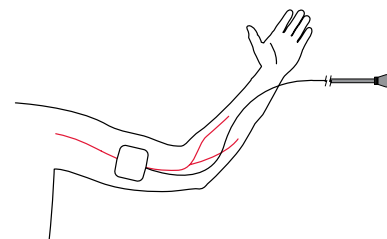


Paso 4

Elija el tamaño adecuado del manguito desechable de SunTech. El manguito tiene unas marcas de colocación tanto en la parte interna como en la externa para elegir un tamaño adecuado.

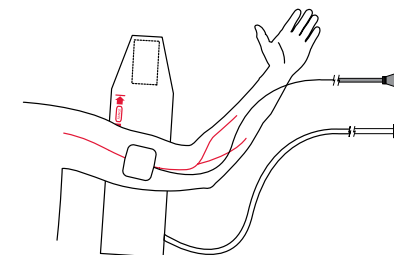


Paso 5

Asegure bien el manguito alrededor del brazo. La marca que representa la arteria debe estar sobre la arteria braquial, tal y como se muestra a continuación.

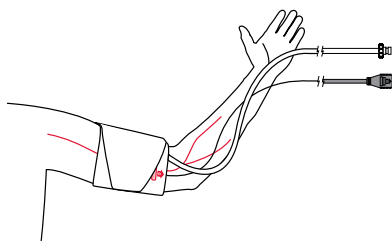


Paso 6

Acople el cable del micrófono al conector, tal y como se indica debajo. Los conectores se pueden introducir orientados de cualquier manera. Se escuchará un clic cuando queden bien conectados.

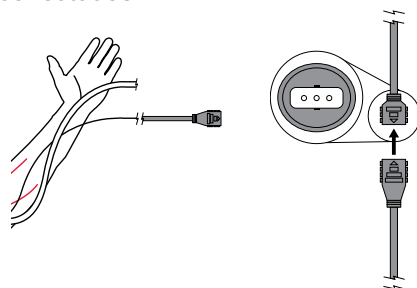

Paso 7

Acople el tubo del manguito al conector del cable del paciente del Tango M2, según se indica aquí.

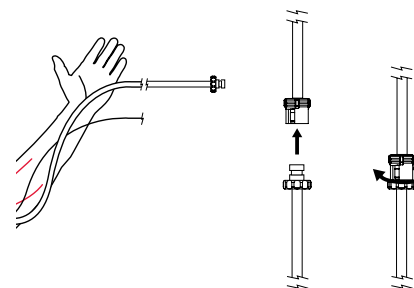

Paso 8

Utilice las muñequeras suministradas con el monitor Tango M2 para fijar tanto el cable del paciente como el cable del micrófono a la muñeca del paciente, tal y como se muestra a continuación.

