


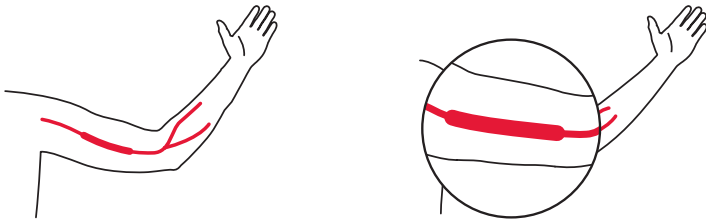


## Step 1

Palpeer de a. brachialis tussen de triceps en de biceps.




## Step 2

Kies de juiste maat manchet. De manchet heeft bereikmarkeringen zowel aan de binnen- als aan de buitenkant om de juiste maat te garanderen.

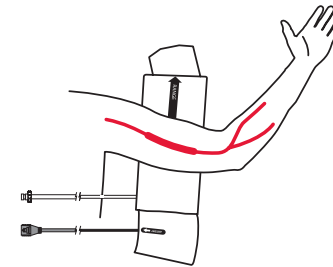


## Step 3

Breng de manchet aan op de arm. Zorg ervoor dat de slagadermarkering omlaag wijst en dat de microfoon zich boven de a. brachialis bevindt, op 3 tot 5 cm van de elleboog.

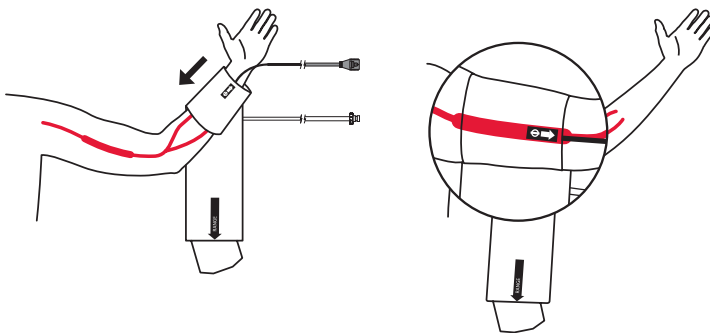


## Step 4

Wikkel de manchet stevig om de arm. Gebruik de bij het Tango M2-systeem geleverde polsriempjes om zowel de patiëntkabel als de microfoonkabel om de pols van de patiënt vast te zetten zoals hieronder wordt weergegeven.

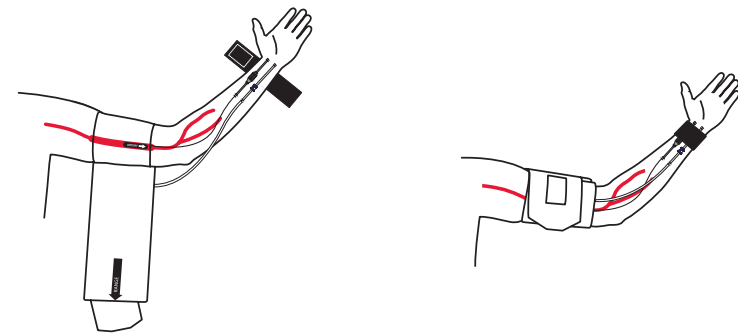


## Step 1

Doe de microfoon in de microfoonpad zoals wordt weergegeven. Het zelfklevende oppervlak houdt de microfoon in de microfoonpad.

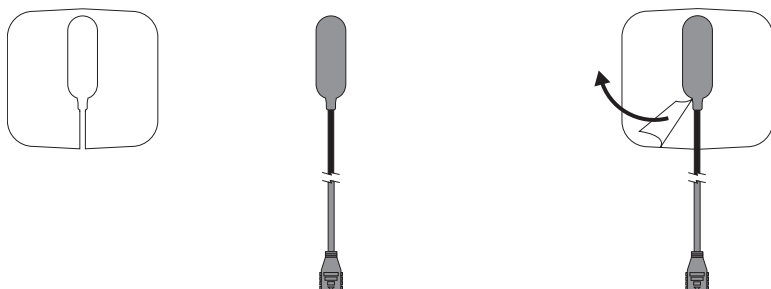


## Step 2

Trek de bescherm laag van de microfoonpad af zoals hieronder wordt weergegeven.

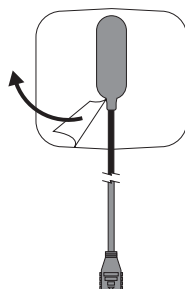


## Step 3

De plaatsing van de microfoon is van essentieel belang voor het goed functioneren van de *Tango M2*. Plaats de microfoon boven de a. brachialis, tussen de biceps en de triceps (ongeveer twee vingerbreedtes boven de elleboogplooi).

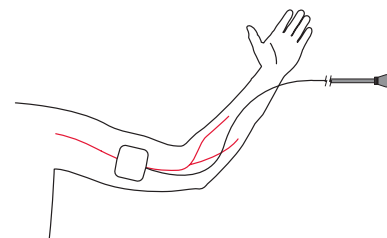


## Step 4

Kies de juiste maat *SunTech*-manchet voor eenmalig gebruik. De manchet heeft bereikmarkeringen zowel aan de binnen- als aan de buitenkant om de juiste maat te garanderen.

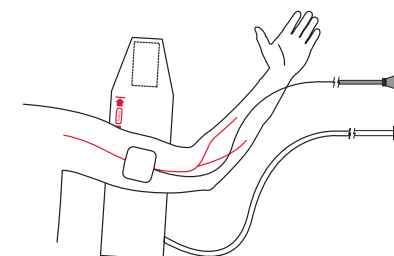


## Step 5

Wikkel de manchet stevig om de arm. De slagadermarkering moet zich boven de a. brachialis bevinden zoals hieronder wordt weergegeven.

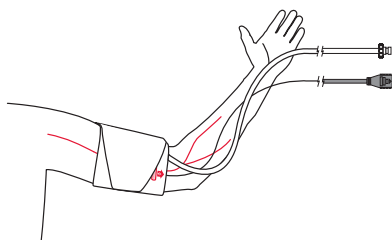


## Step 6

Steek de microfoonkabel in de connector zoals hieronder wordt weergegeven. De connector kan in elke richting worden ingestoken. Er is een klik te horen als de aansluiting goed vast zit.

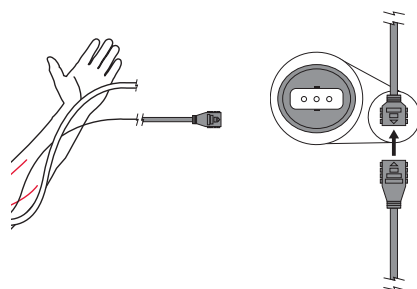

## Step 7

Sluit de manchetslang aan op de connector van de patiëntkabel van de *Tango M2* zoals hieronder wordt weergegeven.

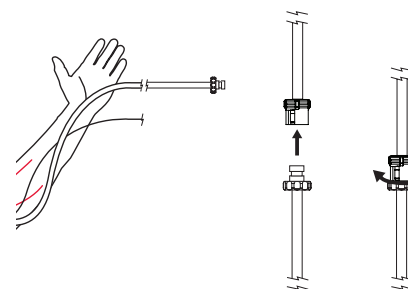

## Step 8

Gebruik de bij het *Tango M2*-systeem geleverde polsriempjes om zowel de patiëntkabel als de microfoonkabel om de pols van de patiënt vast te zetten zoals hieronder wordt weergegeven.

